


H200 ワイヤレスシステムの充電


システム充電セットを H200 ワイヤレス装具と H200 ワイヤレスコントロールユニットに同時に接続します。H200 ワイヤレスシステムは毎日充電します。

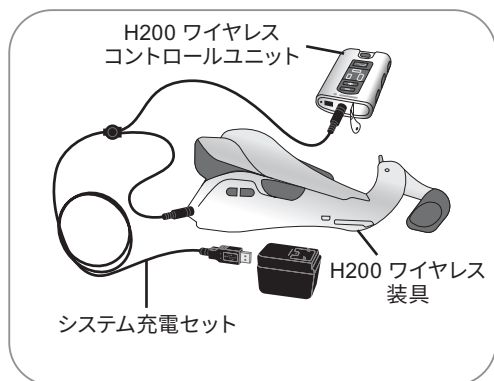

コントロールユニット充電中のディスプレイ		
	黄色に点滅	電池残量が少ない
	緑色の円を描く	充電中
	緑色の水平のライン	充電完了
装具充電中のディスプレイ		
	ステータス表示ランプが黄色に点滅	電池残量が少ない
	ステータス表示ランプが黄色と緑色に点滅	充電中
	ステータス表示ランプが緑色に点灯	充電完了

H200 ワイヤレス装具の装着


- 1 布製電極を濡らして取り付けます。
- 2 安定した平面上に装具を置き、手をらせん状先端部に差し入れます。母指球（電極を取り付ける）を親指の付け根に合わせます。
- 3 リストブリッジが手首の甲に無理なく納まるように装着してください。
- 4 装具の屈筋サポートに前腕を置きます。
- 5 伸筋ウィングを閉じます。
- 6 適切であれば、リストストラップを締めます。

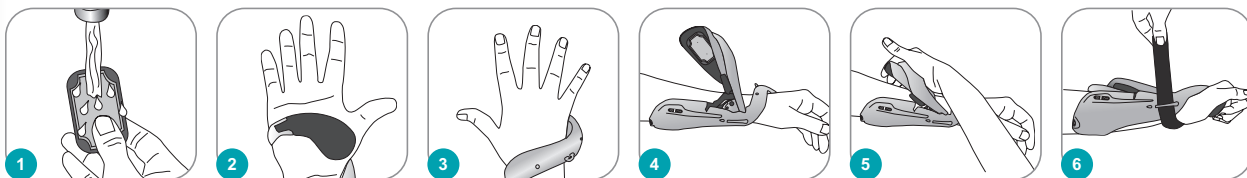

H200 ワイヤレス装具のディスプレイ

電源オン ステータス表示ランプ 緑色に点滅	刺激オン 刺激表示ランプ 黄色に点滅	刺激一時停止 刺激表示ランプ 黄色に点灯	電極の接触不良 ステータス表示ランプが 赤色に点滅	ハードウェア/ ソフトウェアエラー、 充電エラー ステータス表示ランプが 赤色に点灯

H200 ワイヤレスシステムの操作

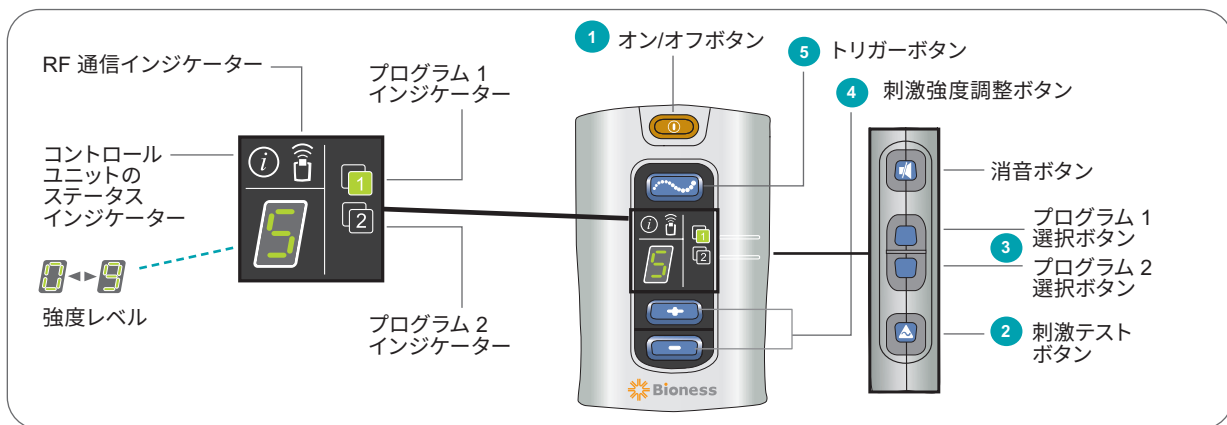

- 1 システムの電源を入れます。 オン/オフボタンを押します。
- 2 装具の位置をテストします。 刺激テストボタンを1回長押しして伸筋をテストします。ボタンを放し、再度長押しして屈筋をテストします。必要であれば、この手順を繰り返します。
- 3 プログラム 1 またはプログラム 2 を選択します。コントロールユニット側面のプログラム 1 選択ボタンまたはプログラム 2 選択ボタンを押します。選択したプログラムのインジケーターが緑色になります。 または
- 4 必要であれば、刺激強度レベルを調整します。 プラスボタンまたは マイナスボタンを押して、装具の刺激強度を増減します。
- 5 プログラムを開始します。コントロールユニットの トリガーボタンまたは装具のトリガーボタンを押して、刺激をオンにします。プログラムを一時停止/再開するには、コントロールユニットのトリガーボタンまたは装具のトリガーボタンを押します。

注記：ニューロプロテーゼプログラムは一時停止することができません。刺激オンのときトリガーボタンを押すと、プログラムの次の段階に移行します。刺激をオフにするには、 オン/オフボタンを押します。

H200 ワイヤレスコントロールユニットディスプレイ

	オン/オフボタンが緑色に点滅	電源オン
	トリガーボタンが黄色にすばやく点滅	刺激オン
	トリガーボタンが黄色に点灯	刺激一時停止
	プログラム 1 インジケーターが緑色	プログラム 1 が選択されている
	プログラム 2 インジケーターが緑色	プログラム 2 が選択されている
	コントロールユニットのステータスインジケーターが赤色に点灯	コントロールユニットの故障：充電エラー、登録エラー、ソフトウェアエラー
	RF 通信インジケーターが赤色に点滅	RF 通信エラー

Rx のみ (米国内)

禁忌、警告、副作用、使用上の注意、およびお手入れ方法の一覧は、患者用マニュアルをご覧ください。