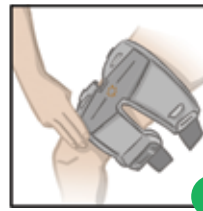


הנחת סד הירך L300 Go

- 1 הרטב והצמד את אלקטרודות הבד לירך לסד הירך L300 Go.
- 2 להנחה על שריר הירך הארבע ראשי במצב ישיבה הנח את סד הירך L300 Go על הירך כשסימן המיקום במרחק של שלוש אצבעות מהברך.
- 3 הקפד להניח את סד הירך L300 Go לפי הוראות המטפל. ראה איור 3.
- 4 להנחה על שרירי מיתר הברך במצב ישיבה או עמידה הנח את סד הירך L300 Go במרחק של לפחות ארבע אצבעות מעל לחלק האחורי של הברך – ממש מתחת לקפל העכוז. ראה איור 4.



הפעלת המערכת L300 Go



- 1 לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את ה-EPG.
- 2 בחר מצב הליכה או תרגול:
 - כדי לבחור במצב הליכה, לחץ על לחצן המצב לזמן קצר.
 - כדי לבחור במצב אימון, לחץ והחזק את לחצן המצב במשך 3 שניות.
- 3 במידת הצורך, כוון את עוצמת הגירוי באמצעות לחיצה על לחצן הפלוס או המינוס .
 - ה-EPG יאשר את המצב החדש בהתראה קולית ובמגע. כדי לצאת ממצב אימון, לחץ והחזק את לחצן המצב במשך 3 שניות.

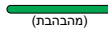
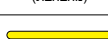
לרשימה מלאה של התוויות נגד, אזהרות, תופעות לוואי, אמצעי זהירות והוראות טיפול, עיין במדריך למשתמש.

חבר את מטען המערכת ל-EPG, ואחר כך חבר את המטען לשקע בקיר.

סוללת EPG חלשה	פס חיווי מצב ה-EPG יבהב באדום, ונורית חיווי הסוללה תבהב בצהוב	 (מהבהבת)
סוללה חלשה	מהבהבת בצהוב	 (מהבהבת)
טוען	מהבהבת בירוק	 (מהבהבת)
טעון במלואו	ירוק רציף	



תצוגות EPG

המערכת פועלת	מהבהבת בירוק	 (מהבהבת)
גירוי כבוי	מהבהבת בירוק	 (מהבהבת)
גירוי מופעל	מהבהבת בצהוב	 (מהבהבת)
שגיאה פעילה	מהבהבת באדום בליווי התרעה קולית	 (מהבהבת)
תקלת EPG	אדום רציף	



תצוגות יחידת הבקרה*

המערכת פועלת	רציפה	
המערכת במצב הליכה/תרגול, הגירוי מאפשר אך כבוי	גל גירוי מוצג	
המערכת במצב הליכה/תרגול, הגירוי מאפשר ומופעל	גל גירוי מהבהבת	
עוצמה	תצוגות 0-9	
מצב הליכה מאפשר	סמל הליכה	
מצב תרגול מאפשר	סמל תרגול	
השמע מופעל	סמל שמע	



*רכיב אופציונלי

שגיאת מערכת

מגע אלקטרודות לקוי. ודא שהאלקטרודות מחוברות, ושה-EPG מונח כיאות בתושבת. נקה את התראת השגיאה באמצעות לחיצה על  או  ב-EPG.			 (מהבהבת)
תקלת EPG. לחץ והחזק את לחצן  במשך 30 שניות ואחר כך הפעל או התקשר לתמיכה הטכנית.		סוללה חלשה ב-EPG. טען את המערכת.	 (מהבהבת)