

Tarjeta de instrucciones del especialista

H200 WIRELESS[®]

Ajuste de la órtesis H200 Wireless

- 1 Seleccione el tamaño de órtesis adecuado y sujete la unidad tenar correcta.
- 2 Sujete el accesorio amortiguador para la muñeca adecuado.
- 3 Coloque la órtesis y compruebe el espacio entre el electrodo n.º 5 del FPL y la muñeca. Si queda hueco, sujete y apriete la correa para la muñeca de la órtesis.
- 4 Si sigue habiendo hueco, retire la órtesis y sujete el panel para el FPL.
- 5 Seleccione y sujete un panel de ajuste para el extensor para estimular el movimiento deseado de la mano o el dedo. Para empezar, ajuste el panel A.
- 6 Seleccione y sujete un panel de ajuste para el flexor para estimular el movimiento deseado de la mano o el dedo. Para empezar, ajuste el panel A.
- 7 Humedezca todos los electrodos de tela.
- 8 Sujete los electrodos de tela a sus bases.
- 9 Coloque la órtesis.
- 10 Ajuste los parámetros de estimulación.



Ajuste de los parámetros de estimulación

- 1 Inicie sesión en el software de H200 Wireless. Seleccione un expediente del paciente y presione Abrir, o bien presione Nuevo para crear un expediente nuevo.
- 2 En el menú Programas, presione Parámetros est.
- 3 Ajuste los parámetros de estimulación de los extensores y los flexores. Presione Iniciar para encender la estimulación. Presione Detener para parar la estimulación. Desactive el botón de activación de la órtesis si es necesario. Presione Atrás para volver al menú Programas.



Para obtener una lista completa de todas las contraindicaciones, advertencias, reacciones adversas, precauciones e instrucciones de cuidado, consulte la Guía del especialista.



H200[®] Wireless, Bioness, el logotipo de Bioness[®] y LiveOn[®] son marcas comerciales de Bioness Inc. en los Estados Unidos y en otros países. | www.bioness.com

Ajuste de la configuración del programa

- 1 En el menú Programas, presione Ajustes de programa.
- 2 En la ventana Ajustes de programa, seleccione un programa. Se abrirá la ventana del programa.
- 3 Para los programas Entrenamiento funcional y Neuromodulación motora, ajuste la configuración y presione Iniciar para encender la estimulación. Presione Detener para apagar la estimulación.
- 4 Para el programa Neuroprótesis, ajuste la configuración del programa y presione el botón de activación para encender la estimulación. Cuando esté preparado, presione el botón de activación de nuevo para iniciar la siguiente fase del programa. Presione Detener para apagar la estimulación.








Asignación de pruebas de usuario a los botones 1 y 2 de la unidad de control

- 1 En el menú Programas, presione  Modificar o  Modificar para abrir la ventana Asignar a botón 1 o Asignar a botón 2.
- 2 Seleccione un programa de la lista, presione Editar para modificar la configuración y presione Atrás para asignar el programa.
- 3 Para crear y asignar un programa personalizado, seleccione Personalizado y presione Editar. Puede agregar, eliminar, editar y reordenar segmentos del programa según desee. Ajuste la duración del segmento y la duración total y presione Atrás.



Uso del modo clínico

- 1 Apague la unidad de control del H200 Wireless. Presione y *mantenga presionado* el botón de menos . Presione *brevemente* el botón de encendido . El nivel de intensidad de la estimulación y la letra de programa "A" se alternarán en el panel digital.
- 2 Presione los botones de selección de programa del lateral de la unidad de control para seleccionar los programas clínicos A a G.
- 3 Presione el botón de activación  para encender o apagar la estimulación.
- 4 Si desea salir del modo clínico, presione el botón  de encendido/apagado.

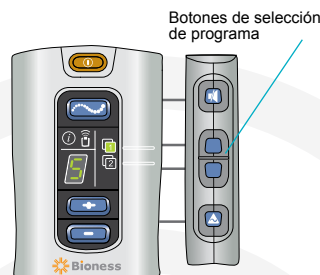

Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355, EE. UU.
Teléfono: 800.211.9136
Correo electrónico: info@bioness.com
Sitio web: www.bioness.com



bioness®
A Bioventus Rehab Company

612-00936-001 Rev. C
01/2023