

Punerea jambierei de stimulare funcțională L300 Go

- 1 Stând așezat, extindeți ușor partea inferioară a piciorului.
- 2 Înclinați partea superioară a jambierei L300 Go spre dvs., apoi glisați-o în sus pe picior până când locatorul se sprijină sub genunchi. Coborâți partea inferioară a jambierei L300 Go pe picior.
- 3 Țineți jambiera L300 Go în poziție cu degetul mare sau altă mână pe suportul dispozitivului GIE. Trageți mânerul benzii de fixare în jurul suportului.
- 4 În Figura 4 este arătată jambiera L300 Go plasată corect pe piciorul drept.



1



2




3



4

Operarea sistemului L300 Go

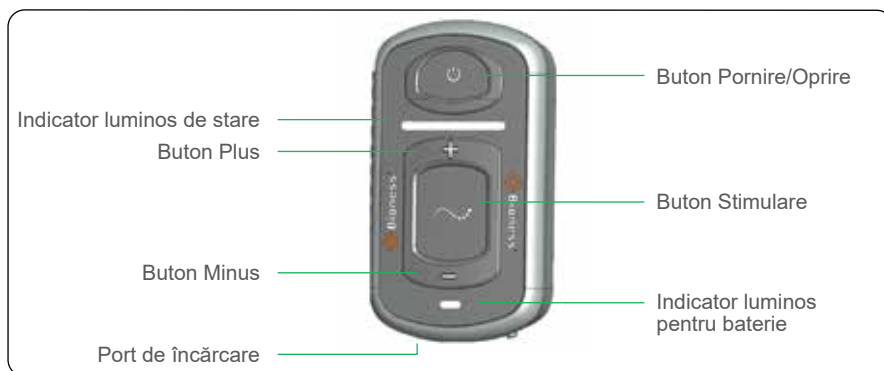

- 1 Apăsați pe butonul Pornire/Oprire  pentru a porni dispozitivul GIE.
- 2 Selectați modul Pășit sau modul Antrenament:
 - Pentru a selecta modul Pășit, apăsați *scurt* pe butonul de mod .
 - Pentru a selecta modul Antrenament, apăsați și *țineți apăsat* butonul de mod  timp de 3 secunde.
Dispozitivul GIE va recunoaște noul mod cu feedback audio și tactil. Pentru a ieși din modul Antrenament, apăsați și *țineți apăsat*  butonul de mod timp de 3 secunde.
- 3 Dacă este necesar, reglați nivelul de intensitate a stimulării apăsând pe butonul Plus  sau Minus .



Încărcarea bateriilor

Conectați setul de încărcare a sistemului la dispozitivul GIE, apoi la o priză de perete.



 (aprindere intermitentă)	Bara indicatorului de stare a dispozitivului GIE se aprinde intermitent (roșu), iar indicatorul luminos pentru baterie se aprinde intermitent (galben)	Nivel scăzut de încărcare a bateriei dispozitivului GIE
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (galben)	Nivel scăzut de încărcare a bateriei
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (verde)	Încărcare
 (aprindere intermitentă)	Aprindere continuă (verde)	Încărcare completă

Afișări pentru dispozitivul GIE



 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (verde)	Sistemul este pornit
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (verde)	Stimularea este oprită
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (galben)	Stimularea este pornită
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (roșu) cu alarmă sonoră	Eroare activă
 (aprindere intermitentă)	Aprindere continuă (roșu)	Funcționare defectuoasă a dispozitivului GIE

Afișări pentru unitatea de control*



	Aprindere continuă	Sistemul este pornit
	Unda stimulării este vizibilă	Sistemul este în modul Pășit/Antrenament, stimularea este activată, însă oprită
	Unda stimulării se aprinde intermitent	Sistemul este în modul Pășit/Antrenament, stimularea este activată și pornită
	Se afișează 0–9	Nivelul intensității
	Se afișează pictograma Pășit	Modul Pășit este activat
	Se afișează pictograma Antrenament	Modul Antrenament este activat
	Se afișează pictograma Audio	Semnalizarea sonoră este pornită

* Componentă opțională

Afișări pentru erori de sistem

 (aprindere intermitentă)	Contact defectuos al electrozilor. Asigurați-vă că electrozii sunt introduși complet și că dispozitivul GIE este introdus complet în suport. Ștergeți alerta de eroare apăsând pe sau pe GIE.		
 (aprindere intermitentă)	Indicator de nivel scăzut de încărcare a bateriei pe dispozitivul GIE. Încărcați sistemul.		Funcționare defectuoasă a dispozitivului GIE. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 30 de secunde și apoi reporniți sistemul sau telefonați la Serviciul de asistență tehnică.

Pentru o listă completă a tuturor contraindicațiilor, reacțiilor adverse și instrucțiunilor de îngrijire, examinați Ghidul utilizatorului.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, sigla Bioness® și LiveOn® sunt mărci comerciale ale Bioness Inc. În SUA sau alte țări. | www.bioness.com