


Utprovning av H200 Wireless-ortosen

- 1 Välj lämplig storlek på ortosen och fäst sedan lämplig tenar.
- 2 Montera ett passande handledsinlägg.
- 3 Sätt på ortosen och titta mellan FPL-elektrod nr 5 och handleden.
Om det finns ett mellanrum fäster du och drar åt ortosens handledsrem.
- 4 Om det fortfarande finns ett mellanrum tar du av ortosen och sätter fast FPL-panelen.
- 5 Välj ut och fäst en extensorpanel som framkallar önskad hand-/fingerrörelse.
Fäst panel A först.
- 6 Välj ut och fäst en flexorpanel som framkallar önskad hand-/fingerrörelse. Fäst panel A först.
- 7 Fukta alla tygelektroder.
- 8 Fäst tygelektroderna på elektrodbaserna.
- 9 Sätt på ortosen.
- 10 Justera stimulansparametrarna.

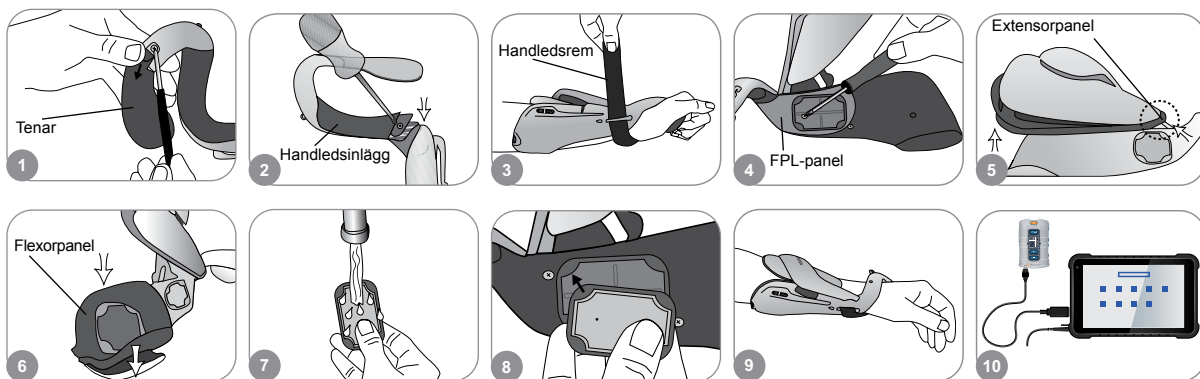

Justera stimulansparametrarna

- 1 Logga in i H200 Wireless-programmet. Välj en patientpost och tryck på Öppna eller tryck på Ny för att skapa en patientpost.
- 2 På programmenyn trycker du på Stimulans parametrar.
- 3 Justera stimulansparametrarna för extensorer och flexorer. Tryck på Starta för att slå på stimuleringen. Tryck på Stopp för att avbryta stimuleringen. Avaktivera utlösarknappen på ortosen om det behövs. Tryck på Tillbaka för att återgå till programmenyn.



En fullständig lista över alla kontraindikationer, varningar, biverkningar, försiktighetsåtgärder samt skötselinstruktioner finns i handboken för kliniska handläggare.

H200® Wireless, Bioness, Bioness®-logotypen och LiveOn® är registrerade varumärken som tillhör Bioness Inc. i USA eller i andra länder. | www.bioness.com

Justera programinställningar

- 1 Gå till programmenyn och tryck på Programinställningar.
- 2 Välj ett program i fönstret Programinställningar. Programfönstret öppnas.
- 3 För programmen Funktionell träning samt Motorisk neuromodulering justerar du programinställningarna och trycker på Starta för att påbörja stimuleringen. Tryck på Stopp för att slå av stimuleringen.
- 4 För neuroprotesprogram justerar du programinställningarna och trycker på Utlösare för att påbörja stimuleringen. När du är redo trycker du på Utlösare igen för att påbörja nästa fas i programmet. Tryck på Stopp för att slå av stimuleringen.




Tilldela användarprogram till styrenhetens knappar 1 och 2

- 1 Gå till programmenyn och tryck på Ändra eller Ändra för att öppna fönstret Tilldela till knapp 1 eller Tilldela till knapp 2.
- 2 Välj ett program i programlistan, tryck på Redigera för att ändra programinställningarna och/eller tryck på Tillbaka för att tilldela programmet.
- 3 Skapa och tilldela ett personligt anpassat program genom att välja Personligt anpassat och trycka på Redigera. Lägg till, ta bort, redigera och/eller ändra programsegmentens ordning efter behov. Justera segmentlängd och den totala tiden, och tryck sedan på Tillbaka.



Använda kliniskt läge

- 1 Stäng av H200 Wireless-styrenheten. **Håll in** minusknappen . Tryck kort på På/Av-knappen . Den digitala skärmen växlar mellan att visa intensitetsnivån för stimulansen och programbokstaven "A".
- 2 Tryck på knapparna för programval på sidan av styrenheten för att välja kliniska program A–G.
- 3 Tryck på utlösarknappen för att starta och stoppa stimuleringen.
- 4 Tryck på På/Av-knappen för att avsluta kliniskt läge.

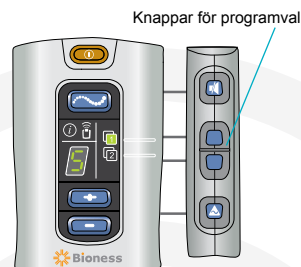

Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefonnummer: 800 211 9136
E-post: info@bioness.com
Webbplats: www.bioness.com



bioness[®]

A Bioventus Rehab Company

612-01076-001 Rev. C
01/2023