

Přizpůsobení ortézy H200 Wireless

- Zvolte vhodnou velikost ortézy a poté připevněte vhodný nástavec pro tenar.
- Připevněte vhodnou zápěstní vložku.
- Nasaďte ortézu a zkontrolujte ji mezi elektrodou č. 5 FPL a zápěstím. Pokud je tam mezera, připevněte a utáhněte poutko na zápěstí ortézy.
- Pokud je tam stále mezera, ortézu sejměte a připevněte panel FPL.
- Vyberte a připevněte tvarovací panel natahovače, pomocí kterého lze vyvolat požadovaný pohyb ruky/prstů. Začněte tvarovacím panelem A.
- Vyberte a připevněte tvarovací panel ohýbače, pomocí kterého lze vyvolat požadovaný pohyb ruky/prstů. Začněte tvarovacím panelem A.
- Namočte všechny textilní elektrody.
- Připojte textilní elektrody k elektrodovým základnám.
- Nasaďte ortézu.
- Upravte parametry stimulace.



Úprava parametrů stimulace

- Přihlaste se do softwaru H200 Wireless. Vyberte záznam pacienta a stiskněte Open (Otevřít) nebo stiskněte New (Nový) pro vytvoření záznamu pacienta.
- Z nabídky Programs (Programy) stiskněte Stim. Parameters (Parametry stimulace).
- Upravte parametry stimulace pro natahovače a ohýbače. Stiskněte tlačítko Start pro zapnutí stimulace. Stisknutím tlačítka Stop zastavte stimulaci. Deaktivujte spouštěcí tlačítko na ortéze, je-li to třeba. Stiskněte Back (Zpět) pro návrat do nabídky Programs (Programy).

					Programs		Tomalation Parameters		
•	Antone 1 Ter	inthese a be	Las Instan British China	•	Stimulation Parameters	Program Settings		12 200 + Attachant	
-	1.	1	And the same of the		1 former for the second	ing Contractor	2 2 55	1. Jacobsen	– Deaktivace
1			Ор	en	2 Prove 1 10 10 10			Back	dálkového spouštěcíh tlačítka

Úplný přehled všech kontraindikací, varování, nežádoucích reakcí, preventivních opatření a pokynů pro péči najdete v příručce lékaře.

H200[®] Wireless, Bioness, logo společnosti Bioness[®] a LiveOn[®] jsou ochrannými známkami společnosti Bioness Inc. ve Spojených státech amerických nebo dalších zemích. | www.bioness.com

Úprava nastavení programu

- V nabídce Programs (Programy) vyberte Program Settings (Nastavení programu).
- 2 V okně Program Settings (Nastavení programu) vyberte program. Otevře se okno programu.
- Pro programy Functional Training (Funkční výcvik) a Motor Neuromodulation (Motorová neuromodulace) upravte nastavení programu a stiskněte tlačítko Start pro zapnutí stimulace. Stiskněte tlačítko Stop pro vypnutí stimulace.
- Pro Neuroprosthesis Programs (Programy neuroprotézy) upravte nastavení programu a stiskněte tlačítko Trigger (Spustit) pro zapnutí stimulace. Jakmile budete připravení, stiskněte tlačítko Trigger (Spustit) podruhé pro zahájení další fáze programu. Stiskněte tlačítko Stop pro vypnutí stimulace.



Přiřazení uživatelských programů tlačítkům 1 a 2 na řídicí jednotce

- V nabídce Programs (Programy) stiskněte tlačítko 1 Modify (Změnit) nebo 2 Modify (Upravit) pro otevření okna Assign to Button (Přiřazení (programu) tlačítku) 1 nebo Assign to Button (Přiřadit k tlačítku) 2.
- Vyberte program ze seznamu programů, stiskněte tlačítko Edit (Upravit) a upravte nastavení programu, případně stiskněte Back (Zpět) pro přiřazení programu.
- Pro vytvoření a přiřazení programu přizpůsobeného potřebám uživatele zvolte Personal Custom (Přizpůsobení potřebám uživatele) a stiskněte Edit (Upravit). Přidejte, vymažte, upravte, případně změňte pořadí segmentů programu podle potřeby. Upravte dobu trvání segmentu a celkovou dobu trvání a poté stiskněte tlačítko Back (Zpět).



Používání klinického režimu

- Vypněte řídicí jednotku H200 Wireless. Stiskněte a podržte tlačítko mínus . Krátce stiskněte vypínač . Na digitálním displeji se bude střídat stupeň intenzity stimulace a písmeno programu "A".
- Stiskněte tlačítka pro volbu programů na boční straně řídicí jednotky pro volbu klinických programů A–G.
 - Stisknutím tlačítka Trigger (Spustit) 🖂 zapněte/vypněte stimulaci.
- Stiskněte vypínač o ortézy pro ukončení klinického režimu.





Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop Valencia, CA 91355 Telefon: +1 800 211 9136 E-mail: info@bioness.com Web: www.bioness.com



612-01080-001 Rev. C 01/2023