


Funktsionaalse stimulatsioonimanseti L300 Go paigaldamine

- 1 Istuge ja sirutage jalg kergelt välja.
- 2 Kallutage manseti L300 Go ülaosa enda poole ja libistage seda mööda säärt üles, kuni lokaator toetub põlvekedra alla. Langetage manseti L300 Go alaosa säärele.
- 3 Hoidke mansetti L300 Go paigal, nii et põial või teine käsi on EPG raamil. Tõmmake rihma pide ümber raami.
- 4 Joonisel 4 on näidatud mansett L300 Go õigesti paremale jalale paigutatuna.



1

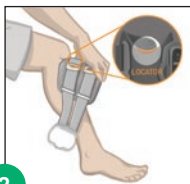

2




3



4

Süsteemi L300 Go kasutamine

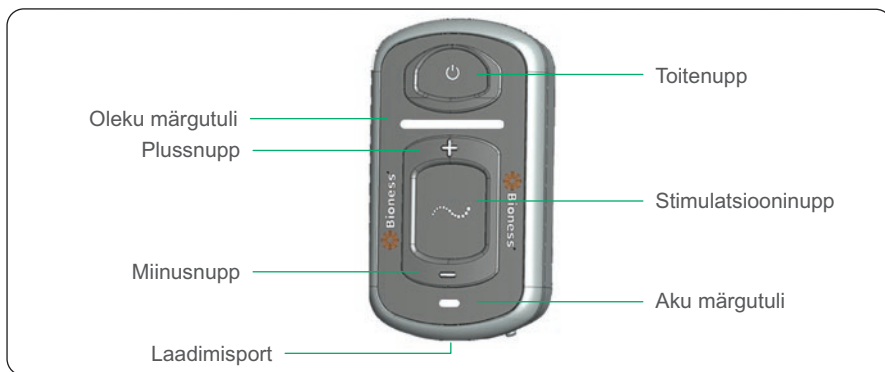

- 1 EPG sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .
- 2 Valige kas kõndimis- või treeningurežiim.
 - Kõndimisrežiimi valimiseks vajutage lühidalt režiiminuppu .
 - Treeningurežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu  ja hoidke seda 3 sekundit all. EPG kinnitab uue režiimi helisignaali ja vibratsiooniga. Treeningurežiimist väljumiseks vajutage režiiminuppu ja  hoidke seda 3 sekundit all.
- 3 Vajaduse korral reguleerige stimulatsiooni intensiivsust, vajutades plussnuppu  või miinusnuppu .



Aku laadimine

Ühendage süsteemi laadimiskomplekt EPG-ga, seejärel ühendage see vooluvõrku.



 (vilgub)	EPG oleku näidikuriba vilgub punaselt ja aku näidikutuli kollaselt	EPG aku on tühi
 (vilgub)	Vilgub kollaselt	Aku on tühjenemas
 (vilgub)	Vilgub roheliselt	Laadimine
 (vilgub)	Põleb roheliselt	Täis laetud

EPG kuvad



 (vilgub)	Vilgub roheliselt	Süsteem on sisse lülitatud
 (vilgub)	Vilgub roheliselt	Stimulatsioon on välja lülitatud
 (vilgub)	Vilgub kollaselt	Stimulatsioon on sisse lülitatud
 (vilgub)	Vilgub punaselt ja kõlab helisignaal	Aktiivne tõrge
 (vilgub)	Põleb punaselt	EPG talitlushäire

Juhtseadme kuvad*



	Tähiseta	Süsteem on sisse lülitatud
	Stimulatsioonilaine tähisega	Süsteem on kõndimis-/treeningurežiimis, stimulatsioon on lubatud, kuid välja lülitatud
	Stimulatsioonilaine tähis vilgub	Süsteem on kõndimis-/treeningurežiimis, stimulatsioon on lubatud ja sisse lülitatud
	0–9	Intensiivsustase
	Kõndimisikoon	Kõndimisrežiim on lubatud
	Treeninguikoon	Treeningurežiim on lubatud
	Heliikoon	Heli on sisse lülitatud

*Valikuline komponent

Süsteemi tõrkekuvad

 (vilgub)	Elektroodikontakti viga. Veenduge, et elektroodid oleksid ühendatud ja EPG täielikult raamis. Tõrkemärguande eemaldamiseks vajutage EPG-l nuppu  või  .	
 (vilgub)	Tühja aku tähis EPG-l. Laadige süsteemi.	 EPG talitlushäire. Vajutage ja hoidke nuppu  30 sekundit all ning siis lülitage seade sisse. Võite ka helistada tehnilisele toele.

Vastunäidustuste, hoiatuste, kõrvaltoimete, ettevaatusabinõude ja hooldusjuhiste täieliku loendi leiате kasutusjuhendist.