


Stavljanje funkcionalne stimulacijske manšete L300 Go

- 1 Dok sjedite, malo ispružite potkoljenicu.
- 2 Nagnite gornji dio manšete L300 Go prema sebi, a zatim je povlačite uz nogu dok se lokator ne smjesti ispod koljena. Spustite donji dio manšete L300 na nogu.
- 3 Palcem ili drugom rukom na ležištu EPG-a držite manšetu L300 Go na mjestu. Povucite ručicu remena oko ležišta.
- 4 Na slici 4 prikazana je pravilno postavljena manšeta L300 Go na desnu nogu.



1

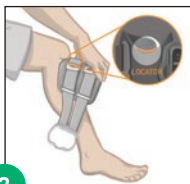

2




3



4

Upravljanje sustavom L300 Go

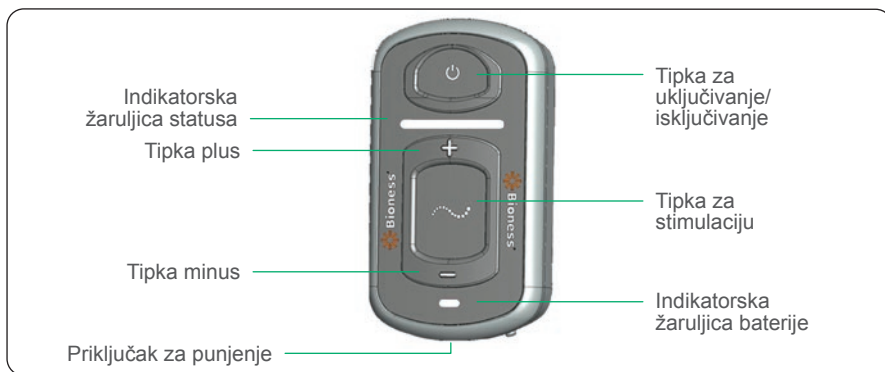

- 1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje  da biste uključili EPG.
- 2 Odaberite način rada za hod ili treniranje:
 - Za odabir načina rada za hod *kratko* pritisnite tipku za način rada .
 - Za odabir načina rada za treniranje pritisnite i 3 sekunde *držite* tipku za način rada . EPG će potvrditi novi način rada zvučnom ili taktilnom povratnom informacijom. Za izlazak iz načina rada za treniranje pritisnite i 3 sekunde držite tipku za način rada .
- 3 Ako je potrebno, prilagodite razinu intenziteta stimulacije pritiskom na tipku plus  ili minus .



Punjenje baterija

Priključite punjač za sustav na EPG, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu.



	Traka statusa EPG-a treperi crveno, a indikatorsko svjetlo baterije treperi žuto	Niska razina baterije EPG-a
	Treperi žuto	Niska razina baterije
	Treperi zeleno	Punjenje
	Stalno zeleno	Potpuno napunjeno

Prikazi EPG-a



	Treperi zeleno	Sustav je uključen
	Treperi zeleno	Stimulacija je isključena
	Treperi žuto	Stimulacija je uključena
	Treperi crveno uz zvučni alarm	Aktivna greška
	Stalno crveno	Neispravnost EPG-a

Prikazi upravljačke jedinice*



	Stalno	Sustav je uključen
	Vidljiv val stimulacije	Sustav je u načinu rada za hod/treniranje, stimulacija je omogućena, ali isključena
	Val stimulacije treperi	Sustav je u načinu rada za hod/treniranje, stimulacija je omogućena i uključena
	Prikazi 0 – 9	Razina intenziteta
	Prikazuje ikonu hoda	Način rada za hod je omogućen
	Prikazuje ikonu treniranja	Način rada za treniranje je omogućen
	Prikazuje ikonu zvuka	Zvuk je uključen

*Opcionalna komponenta

Prikazi pogrešaka u sustavu

	Neispravan kontakt elektrode. Provjerite jesu li elektrode prikopčane i je li EPG u potpunosti u ležištu. Otklonite upozorenje o pogrešci pritiskom na ili na EPG-u.		
	Indikator slabe baterije na EPG-u. Napunite sustav.		Neispravnost EPG-a. Pritisnite i držite tipku 30 sekundi, a zatim uključite uređaj ili nazovite tehničku podršku.

Popis svih kontraindikacija, upozorenja, nuspojava, mjera opreza i uputa za njegu potražite u vodiču za korisnika.

©2025 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, logotip Bioness® i LiveOn® zigovi su tvrtke Bioness Inc. u Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama. | www.bioness.com

Samo na recept (samo u SAD-u)