


Uparivanje komponenti

VAŽNO: komponente sustava međusobno uparite prije uparivanja s aplikacijom za kliničara

- 1 Manšeta za bedro s donjom manšetom.
Aktivacija načina rada za uparivanje EPG-a: istovremeno pritisnite tipke plus i minus na oba EPG-a. Indikator stanja EPG-a treperit će zeleno, žuto, crveno.
- 2 Po potrebi uparite senzor za stopalo s EPG-om u donjoj manšeti.
Aktivacija načina rada za uparivanje senzora za stopalo: senzor za stopalo s novim EPG-om uparite tako da umetnete bateriju (CR2032) u senzor za stopalo i pritisnete senzor pritiska. Zatrepit će zeleno svjetlo koje potvrđuje aktivaciju načina rada za uparivanje. Stavite donji EPG u način rada za uparivanje.

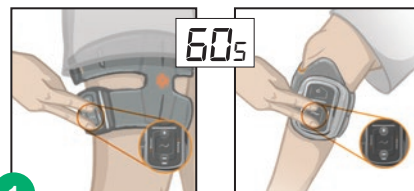



Uparivanje sustava s aplikacijom Klinički programer tvrtke Bioness

- 1 Prijavite se u aplikaciju Klinički programer tvrtke Bioness
- 2 Odaberite  da biste pristupili zaslonu za povezivanje. Istovremeno pritisnite tipke plus i minus na EPG-u da biste postavili sustav u način rada za uparivanje. Odaberite  ikonu povezivanja iznad željene noge. Kad se dovrši uparivanje, izađite iz zaslona za povezivanje klikom na .
- 3 Odaberite pacijenta, *odnosno Rad s postojećim pacijentom, izradi novo ili Odaberite s popisa.* Ako odaberete pacijenta s popisa pacijenata, pritisnite  ikonu za prijenos ili dvaput kliknite odabrano ime.



Postavljanje sustava L300 Go

- 1 Prikvačite osobnu ploču.
- 2 Navucite osobnu navlaku za remen preko remena manšete.
- 3 Obrišite područje stimulacije vlažnom, mekom krpom. Zatim malo ispružite potkoljenicu.
- 4 Nakon što su elektrode pričvršćene na manšetu L300, stavite manšetu na nogu pomoću lokatora patele na manšeti, pričvrstite remen, prilagodite napetost.
- 5 Programirajte postavke stimulacije za postizanje željenog odgovora.

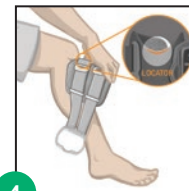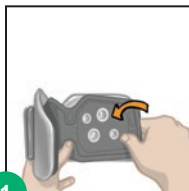


Samo na recept (samo u SAD-u)

Popis svih kontraindikacija, upozorenja, nuspojava, mjera opreza i uputa za njegu potražite u vodiču za korisnika.

L300 Go®, Bioness, logotip Bioness® i LiveOn® žigovi su tvrtke Bioness Inc. u Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama. | www.bioness.com

Namještanje sustava L300 Go samo za bedro

- 1 Namočite elektrode od tkanine za bedro i prikopčajte ih za manšetu.
- 2 Obrišite područje stimulacije vlažnom, mekom krpom. Postavite manšetu na bedro najmanje tri širine prsta proksimalno od poplitealne fose (primjena na stražnjoj loži) ili patele (primjena na kvadricepsu).
- 3 Manšetu centrirajte na srednju liniju bedra. Pričvrstite remenje.
- 4 Programirajte postavke stimulacije dok pacijent sjedi za postizanje željenog odgovora.
- 5 Po potrebi prilagodite postavke stimulacije dok pacijent stoji.

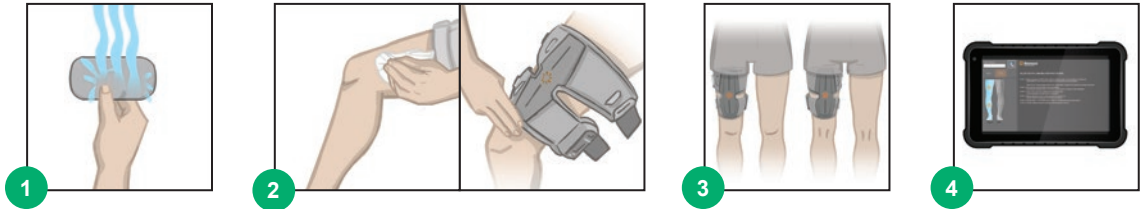

Programiranje sustava L300 Go

- 1  **Programirajte postavke stimulacije.** Na upravljačkoj ploči za kontrolu stimulacije **odaberite željeni EPG.** Odaberite vrstu elektrode (na slici je prikazan zaslon elektrode za kormilarenje). Dok pacijent sjedi, pritisnite  **Test** da biste uključili stimulaciju na odabranom EPG-u. Prilagodite postavke stimulacije za postizanje željenog odgovora. Pritisnite  **Test** da biste zaustavili stimulaciju. Ponovite to za sve povezane EPG-ove.
- 2  **Programirajte postavke hoda.** Pritisnite **ikonu zaslona Hod.** Pritisnite  **ikonu Val stimulacije** kako biste omogućili način rada za hod. Pratite kako pacijent hoda i prilagodite postavke prema potrebi. Pritisnite  **ikonu Val stimulacije** da biste zaustavili stimulaciju.
- 3  **Programirajte postavke za treniranje.** Pritisnite  **ikonu zaslona Treniranje.** Prilagodite postavke treniranja, uključujući isključenje određenog EPG-a po želji. Pritisnite **ikonu Treniranje** kako biste uključili stimulaciju na svim uparenim uređajima koji su uključeni u način rada za treniranje. Pritisnite  **ikonu Treniranje** da biste zaustavili stimulaciju.
- 4 Na kraju svake sesije prekinite vezu sustava tako da pređete na zaslon za povezivanje  i pritisnete  **ikonu Prekini vezu.** Izlaz iz aplikacije za kliničara.

Napomena: pritisnite i držite ikonu ručne stimulacije  kako biste aktivirali stimulaciju na svim uparenim i aktivnim EPG-ovima dok je gumb pritisnut.



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefon: (800) 211-9136
E-adresa: info@bioness.com
Web-mjesto: www.bioness.com



bioness®

A Bioventus Rehab Company

612-01443-001 Rev A
05/2025