


Τοποθέτηση της περικνημίδας λειτουργικής διέγερσης L300 Go

- 1 Ενώ κάθεστε, τεντώστε ελαφρά την κνήμη σας.
- 2 Γυρίστε το πάνω μέρος της περικνημίδας L300 Go προς το μέρος σας και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς τα πάνω στο πόδι σας, μέχρι ο εντοπιστής να ακουμπήσει κάτω από την επιγονατίδα. Χαμηλώστε το κάτω μέρος της περικνημίδας L300 Go πάνω στο πόδι σας.
- 3 Κρατήστε την περικνημίδα L300 Go στη θέση της με τον αντίχειρα ή το άλλο χέρι σας στη βάση EPG. Τραβήξτε τη λαβή του ιμάντα γύρω από τη βάση.
- 4 Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η περικνημίδα L300 Go σωστά τοποθετημένη στο δεξί πόδι.

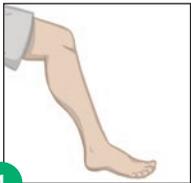

1



2




3



4

Χειρισμός του συστήματος L300 Go

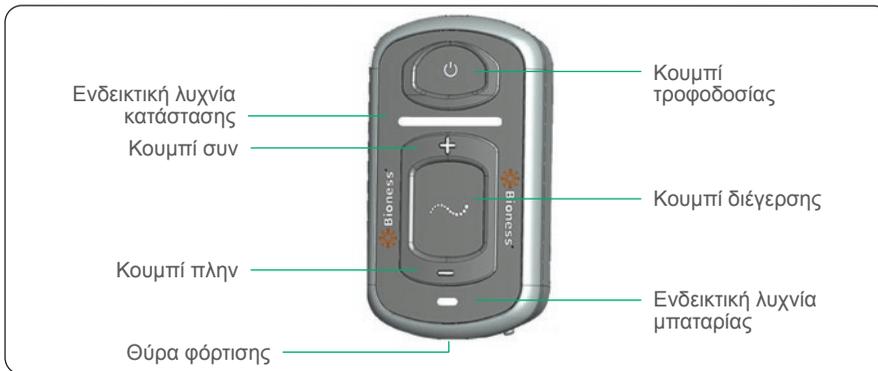

- 1 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  για να ενεργοποιήσετε το EPG.
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία βάδισης ή τη λειτουργία άσκησης:
 - Για να επιλέξετε τη λειτουργία βάδισης, πατήστε *σύντομα* το κουμπί λειτουργίας .
 - Για να επιλέξετε τη λειτουργία άσκησης, πατήστε *παρατεταμένα* το κουμπί λειτουργίας  για 3 δευτερόλεπτα.
Το EPG θα επιβεβαιώσει τη νέα λειτουργία με ανατροφοδότηση ήχου και αφής.
Για έξοδο από τη λειτουργία άσκησης, πατήστε παρατεταμένα το  κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.
- 3 Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το επίπεδο έντασης διέγερσης πατώντας το κουμπί συν  ή πλην .



Φόρτιση των μπαταριών


Συνδέστε το σετ φορτιστή συστήματος στο EPG και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα.



 (αναβοσβήνει)	Η μπάρα ένδειξης κατάστασης EPG αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα μαζί με την ενδεικτική λυχνία μπαταρίας που αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα	Χαμηλή μπαταρία EPG
 (αναβοσβήνει)	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα	Χαμηλή μπαταρία
 (αναβοσβήνει)	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Φόρτιση
 (αναβοσβήνει)	Σταθερό πράσινο χρώμα	Πλήρως φορτισμένη

Ενδείξεις EPG

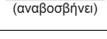

 (αναβοσβήνει)	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
 (αναβοσβήνει)	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η διέγερση είναι απενεργοποιημένη
 (αναβοσβήνει)	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα	Η διέγερση είναι ενεργοποιημένη
 (αναβοσβήνει)	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ηχητικό συναγερμό	Ενεργό σφάλμα
 (αναβοσβήνει)	Σταθερό κόκκινο χρώμα	Δυσλειτουργία EPG

Ενδείξεις μονάδας ελέγχου*



	Σταθερό	Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
	Ορατό κύμα διέγερσης	Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία βάδισης/ άσκησης, η διέγερση είναι ενεργή αλλά απενεργοποιημένη.
	Το κύμα διέγερσης αναβοσβήνει	Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία βάδισης/ άσκησης, η διέγερση είναι ενεργή και ενεργοποιημένη
	Εμφανίζει 0-9	Επίπεδο έντασης
	Εμφανίζει το εικονίδιο βάδισης	Η λειτουργία βάδισης είναι ενεργή
	Εμφανίζει το εικονίδιο άσκησης	Η λειτουργία άσκησης είναι ενεργή
	Εμφανίζει το εικονίδιο ήχου	Ο ήχος είναι ενεργοποιημένος

*Προαιρετικό στοιχείο

Ενδείξεις σφάλματος συστήματος

 (αναβοσβήνει)	Ελαττωματική επαφή ηλεκτροδίου. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρόδια είναι κουμπωμένα και ότι το EPG είναι πλήρως τοποθετημένο στη βάση. Εκκαθαρίστε την ειδοποίηση σφάλματος πατώντας  ή  στο EPG.		
 (αναβοσβήνει)	Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στο EPG. Φορτίστε το σύστημα.		Δυσλειτουργία του EPG. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα ή καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη.

Για έναν πλήρη κατάλογο όλων των αντενδείξεων, προειδοποιήσεων, ανεπιθύμητων ενεργειών, προφυλάξεων και οδηγιών φροντίδας ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη.

©2025 Bioness Inc.

Μόνο με ιατρική συνταγή (Μόνο στις ΗΠΑ)

Τα L300 Go®, Bioness, το λογότυπο Bioness® και LiveOn® είναι εμπορικά σήματα της Bioness Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες. | www.bioness.com